




# TurboPACS »PPG« Paper & Picture Gateway

PPG ist eine einfache, bezahlbare Einbindung von bildgebenden Geräten in TurboMed. Es unterstützt in der Standardausführung: DICOM Store, Direktimport von Sonografiebildern, Loops und Dokumenten in Turbomed

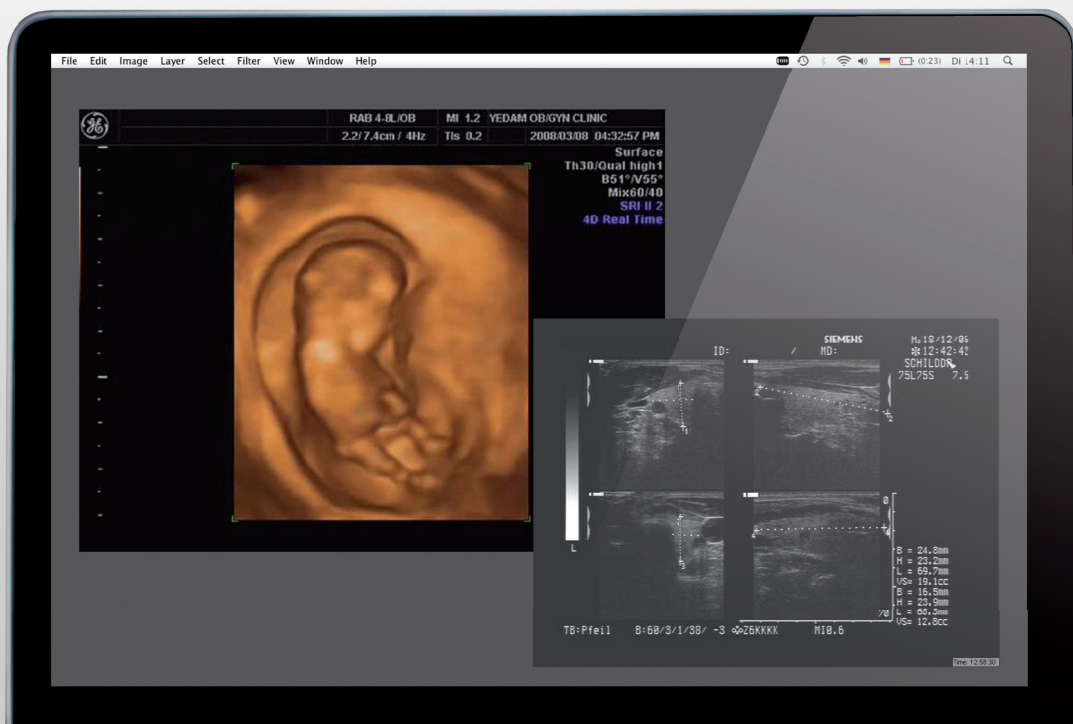

## Vorteile

- ✓ kein DICOM Viewer notwendig, aber optional installierbar
- ✓ kein DICOM Archiv (PACS) notwendig, aber optional installierbar
- ✓ bei vielen Sonogeräten ist Import auch ohne DICOM Freischaltungen möglich
- ✓ kann direkt im Netzwerk an Geräte gekoppelt werden
- ✓ Bildübertragung auch per USB Stick möglich
- ✓ kein PC oder zusätzlicher Fußschalter am bildgebenden Gerät notwendig
- ✓ sehr kostengünstig im Vergleich zu anderen Archivlösungen
- ✓ ideal auf TurboMed und Praxisarchiv der CGM abgestimmt
- ✓ Bilder in die Briefschreibung übernehmbar
- ✓ einfache Installation, per Fernwartung möglich
- ✓ funktioniert auch bestens im Terminalbetrieb, z.B. dezentraler Einsatz im MVZ

Die einfach zu bedienende Software ermöglicht den Import von Sonografiebildern, Scans, Grabber-Karten und DICOM-fähigen Geräten (Sono, CR, Doppler) mit automatischer Patientenzuordnung in Turbomed.

## Was kann TurboPACS »PPG«?

PPG bedeutet »Paper & Picture Gateway« Programm. Die einfach zu bedienende Software ermöglicht den Import von Sonografiebildern, Scanner, Grabber-Karten und DICOM-fähigen Geräten (Sono, CR, Doppler) mit automatischer Patientenzuordnung in Turbomed.

DICOM-fähige Geräte können die erzeugten Bilder als JPG oder Tiff in die Karteikarte von TurboMed speichern. Die Archivierung erfolgt optional im DICOM-Format, wenn dies für Nachmessungen oder CD Erstellung erforderlich ist.

Viele Sonogeräte z.B. Siemens, GE und Mindray ermöglichen den Export von Bildern auch ohne »DICOM-Freischaltung« auf die Festplatte des PCs oder einen USB-Stick.

Das TurboPACS »PPG« ermöglicht die automatisierte Zuordnung von Patientenaufnahmen in den aktuellen Turbomed Behandlungsfall.

Es werden normale Bild-, Video- oder Dokumenteneinträge in der Patientenakte erzeugt. Bild-Serien können zu einem Bildeintrag zusammen gefasst werden. Der Import erfolgt wahlweise automatisch oder manuell.

TurboPACS »PPG« unterstützt Sie bei der Umsetzung der aktuellen »Sonografievereinbarung« zur Sicherung der Befundungsqualität. Beeindruckende Verbesserung der Bildqualität gegenüber herkömmlichen Videoeinbindungen.

Durch Optimierung des Workflows, sparen Sie wertvolle Arbeitszeit ein.



Mit unserer Zusatzoption »RDP/Terminalbetrieb« können mit PPG auch Bilder über »Ferngrabber« und »Fernscanner« automatisch zugeordnet werden.

## Kontakt

**EWERK Medical Care GmbH**  
Markt 16, Leipzig 04109  
P +49 341 42649-77  
F +49 341 42649-78  
medical@ewerk.com  
www.ewerk.com/medical

Überreicht durch:

